

リスクマネジメント支援製品




ガーゼが重なっていると



一度では数える事は出来ません

1枚ずつ  
離れているなら

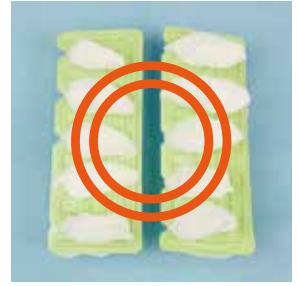

一目で数える事が出来ます

ホルダーの穴にはガーゼが1枚しかはまらないように設計しています

ガーゼ枚数が識別しやすいようにグリーンホルダーを使用しています

使用前

5枚ずつのホルダーが清潔にパック、滅菌されています。




術中

トレー等に整理収納し常時残数と使用数の履歴が目視カウント出来ます。



クリップスタンドを用いて吊り下げてもOK。

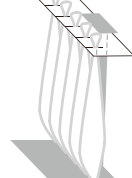

使用后

使用済みホルダーは使用枚数履歴として確認。後カウントと照合出来ます。



開封前  
前カウント

器械出し看護師が  
カウント

術中  
器械出し看護師  
外回り看護師  
ダブルでカウント

ガーゼ使用後  
外回り看護師が  
ホルダーを使って  
後カウント

システムにすることで  
ガーゼカウントミス  
の不安を解消!

仕様①



仕様②



・本品は、ディスプレイ製品であるため、再使用しないでください。

※品コード13240は「高圧蒸気滅菌」となります。

品コード	商品名	規格 (単位: cm)	単位	入数		バーコード	仕様
				中箱	外箱		
13899	医療機器 トレカウントガーゼ X	10枚入 (G)	30 × 30 10枚入 (5枚組 × 2シート) X線造影糸入 EOG滅菌済	袋	10袋 / 箱	4箱 / ケース	4904820138997 ①
13902	医療機器 10カウントガーゼ X	7折 10枚 (G)	30 × 30 7折 10枚入 (5枚組 × 2シート) X線造影糸入 EOG滅菌済	袋	25袋 / 箱	4箱 / ケース	4904820139024 ②
13900	医療機器 カウントガーゼ X	20枚入 (G)	30 × 30 20枚入 (5枚組 × 4シート) X線造影糸入 EOG滅菌済	袋	30袋 / 箱	2箱 / ケース	4904820139000 ①
13901		30枚入 (G)	30 × 30 30枚入 (5枚組 × 6シート) X線造影糸入 EOG滅菌済	袋	25袋 / 箱	2箱 / ケース	4904820139017 ①
*13240		50枚入 (A)	30 × 30 50枚入 (5枚組 × 10シート) X線造影糸入 高圧蒸気滅菌済	袋	20袋 / 箱	2箱 / ケース	4904820132407 ①
*届出番号: 27B1X00112204100 一般医療機器 (クラス I) 一般的名称: X線造影材入りガーゼ (32374000)							
13841	医療機器 カウントガーゼ X	カウントガーゼ X5マイ40枚 #1	30 × 30 10枚入 (5枚組 × 2シート) X線造影糸入	包		10包 / ケース	4904820138416 ①
*届出番号: 27B1X00112104100 一般医療機器 (クラス I) 一般的名称: X線造影材入りガーゼ (32374000)							

■お問い合わせ・資料請求先

amethyst 大衛株式会社

□ 札幌 TEL.011-817-3600  
□ 仙台 TEL.022-225-2745  
□ 東京 TEL.03-5981-7180  
□ 北関東 TEL.03-5981-7180

□ 南関東 TEL.03-5981-7180  
□ 名古屋 TEL.052-369-4110  
□ 学研都市 TEL.072-856-6531  
□ 大阪 TEL.06-6928-7245

□ 広島 TEL.082-211-2166  
□ 福岡 TEL.092-622-8415  
□ コンシューマ事業本部  
TEL.052-355-2711



Protector of Beautiful Life

アメジスト 大衛 検索  
http://www.amethyst.co.jp